

## **NOTICE D'UTILISATION DU DISPOSITIF MEDICAL ANTOUKIT:**

Dispositif de dépistage instantané à usage unique des lésions précancéreuses du col de l'utérus

Dispositif à usage médical pour le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus

### **Composition du dispositif :**

- Un spéculum stérile à usage unique
- Une pince stérile à usage unique
- Deux flacons adaptés contenant respectivement 5 ml de lugol à 5% et 5ml d'acide acétique à 5%
- Trois tampons de coton stériles
- Une fiche autocollable dédiée au résultat et au rendez-vous

### **Mode d'emploi :**

S'assurer que la cliente est éligible au dépistage par IVA, IVL

Effectuer le counseling et encourager la cliente à poser des questions

- L'installer sur le dos en position gynécologique
- Ouvrir délicatement ANTOUKIT
- De la main non dominante, écarter les petites lèvres, patientes installées en position gynécologique
- Introduire de l'autre main, le speculum
- Ajuster le spéculum et la source lumineuse de façon que l'orifice cervical externe puisse être bien visualisé.
- Noter, coloration (rose, rouge, violacé, zones blanches); écoulements (couleurs, abondance, odeur), zone de jonction (visible ou non), kystes de Naboth, lésions (ulcérations, tumeurs, végétations)
- Nettoyer l'exocol si besoin en s'aidant d'une compresse imbibée du sérum physiologique ou d'eau stérile et montée sur une pince longue
- Badigeonner tout le col d'acide acétique.
- Attendre au moins 1 mn
- Noter les résultats :
  - Test négatif : absence de zone acidophile, pas de blanchiment de l'exocol
  - Test positif : apparition de zones acidophiles, blanchiment de l'exocol
- Nettoyer le col à l'aide d'un tampon de coton ou une compresse sèche montée sur une pince longue
- Badigeonner tout le col visible avec de Lugol
- Noter les résultats
  - Test négatif : col de couleur marron foncé ou brun acajou
  - Test positif : présence de zones iodonégatives, jaune orangé ou jaune paille.
- Nettoyer le col à l'aide d'un tampon de coton ou une compresse sèche montée sur une pince longue
- Retirer doucement le speculum
- Aider la patiente à descendre de la table d'examen
- Demander à la patiente de s'habiller
- Compléter la fiche dédié pour le résultat ;
- Discuter des résultats du test avec la cliente et prescrire la conduite à tenir

appropriée.

Porter les résultats sur le registre de compte-rendu

### **Précaution d'emploi :**

s'assurer d'avoir vu la ligne de jonction avant de valider les résultats obtenus

Ne pas utiliser chez la femme enceinte après le premier trimestre, en cas de menstrues, et chez les femmes vierges.

**Contre-Indications :** ne pas utiliser en cas d'infection gynécologique basse sévère, des menstrues, et chez les vierge.

**Lot:**

**Date de fabrication :**

**Date de péremption :**

**Nom et adresse du fabricant:**

**Fabriquant: FESAM**

**Siège social: Parakou, zongo 2 (Bénin),**

**Maison Nassirou TRAORE**

**Tél : 00229 97226368 / 0022996166986**

**Mail : antoukit10@gmail.com**